

Safersonic

Steriler Ultraschallbezug mit Haftfolie



- Keine Artefakte
- Kein Gel am Transducer
- Keine Kleberückstände
- Latexfrei

NEU: Zur intraoperativen Verwendung!

Ultraschallbezug mit Haftfolie

Die Haftfolie ersetzt das Ultraschall-Gel zwischen Transducer und Innenseite des Bezuges – verhindert so lästige Bläschen und Falten.

Die teleskopische Faltung ermöglicht das sterile Anbringen des Ultraschallbezuges!

Safersonic Ultraschallbezüge sind für die intraoperative Anwendung explizit zugelassen!

Drei Schritte zur erfolgreichen Anwendung



Fassen sie entlang des weißen Befestigungsstreifens in die „richtige“ Faltung und lösen sie das Deckpapier.



In der Mitte der Schallaustrittsfläche die Klebefläche mit dem Mittelfinger zuerst andrücken, anschließend zu beiden Seiten ausstreichen. Die „Einfingertechnik“ verhindert die Bildung von Falten zwischen den Fingern!



Die unsterile Person zieht die Ultraschallabdeckung über Schallkopf und Kabel zurück. Zusätzliche Fixation mittels weißem Klebeband!



Gebrauchsanweisung und Videos auf: www.safersonic.com

Produkt	KatNr.	Dim.	VE
Safersonic Single	SAF. 612. 18030	18 x 30	50
Safersonic Medium	SAF. 612. 18050*	18 x 50	50
Safersonic Conti	SAF. 612. 18120	18 x 120	50
Safersonic Long	SAF. 612. 18250	18 x 250	50

* auf Anfrage

ERMED AG

Tel 052/687 40 80 Fax 052/687 40 89
www.armed.ch info@armed.ch
 Zunderst Wyler 14 8226 Schleithem

Safersonic Medizinprodukte Handels-GmbH

Herrengasse 5 | A - 3370 Ybbs an der Donau | Tel.: +43 (0) 7412 55772 | E-mail: info@safersonic.com