

Versuchen Sie das nicht mit gefüllten Einwegpumpen anderer Hersteller!

Auto Fuser

Auto Selector



ACEMEDICAL





Beschreibung

Einwegpumpe für die kontinuierliche Medikamenten Applikation im ambulanten sowie stationären Bereich. Sehr einfache Bedienung für Fachkräfte und Patienten.

Die Vorteile der AutoFuser® und AutoSelector® Einwegpumpen liegen auf der Hand: Das kleine, flache und sehr stabile Reservoir bietet Komfort und Sicherheit in allen Bereichen der medikamentösen Therapie. Die Pumpe findet Platz in einer unauffälligen Gürteltasche.

Vorteile

- Rundes und flaches Reservoir
- Sehr einfach, mit wenig Kraftaufwand zu befüllen
- Stabiles Gehäuse bietet Sicherheit
- Flussregler muss nicht auf der Haut befestigt werden

Anwendungsgebiete

- Therapie mit Onkologika
- Schmerztherapie
(akut, chronisch, palliativ, postoperativ)
- Antibiotikatherapie (z. B. zystische Fibrose)

Applikation

- Intravenös, subkutan, lokoregional, epidural
- Füllvolumen 100 ml, 150 ml, 275 ml und 550 ml
- Therapiedauer: 1 Tag, 2, 4, 5 und 7 Tage
- Fördergenauigkeit: $\pm 15\%$ bei 25 Grad Celsius
- Modelle: kontinuierlich
(kontinuierlich mit Bolus als PCA Version)
- Latex- und DEHP-frei


Auto Fuser

- Füllvolumen 100 ml, 150 ml und 275 ml
- Definierte Flussrate



Auto Selector


- Füllvolumen: 100 ml, 275 ml und 550 ml
- Wählbare Flussrate:
Typ A: 0,5 – 7 ml/h
Typ B: 1 – 14 ml/h
- Bolus Volumen:
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml,
3,0 ml, 5,0 ml
- Sperrzeit:
10 min, 15 min, 30 min, 60 min

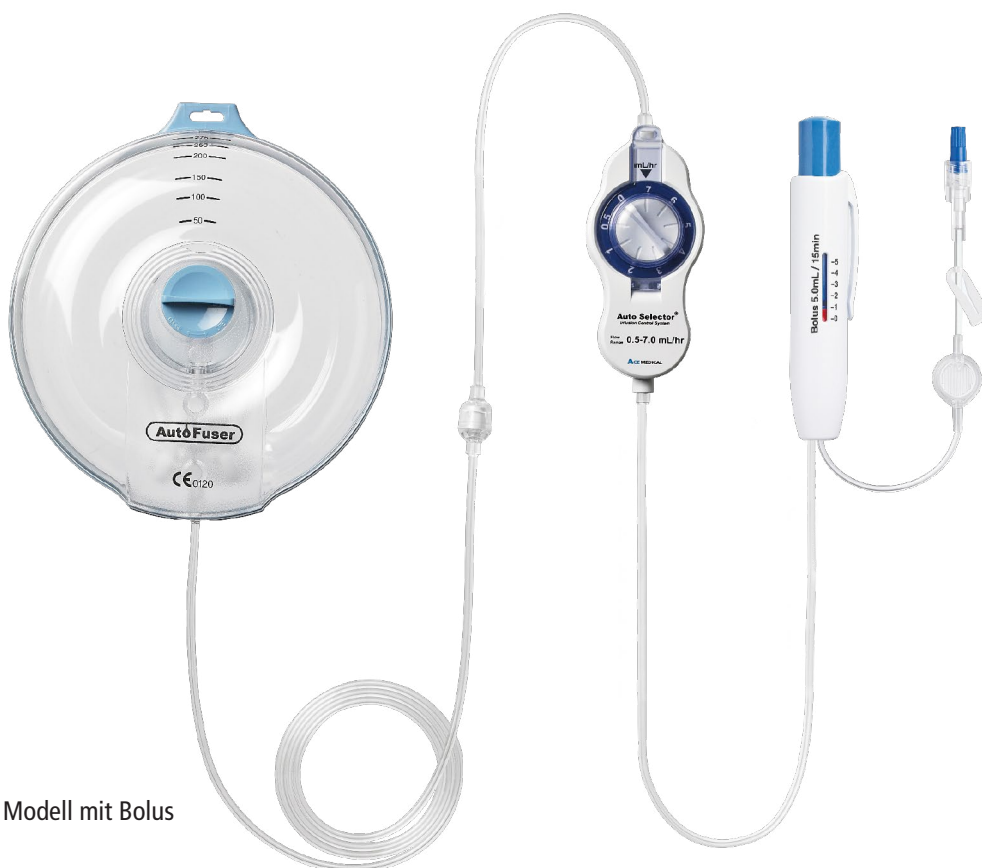

Modell mit Bolus



Typ A

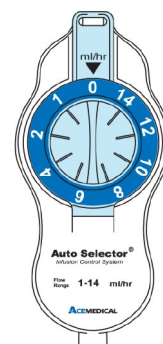

Typ B

Modell	AutoFuser®
AA1904	AutoFuser® 100 ml 1 Tag, OP à 10 Stk. Flussrate 4,2 ml/h
AA1902	AutoFuser® 100 ml 2 Tage, OP à 10 Stk. Flussrate 2,1 ml/h
AA1506	AutoFuser® 150 ml 1 Tag, OP à 10 Stk. Flussrate 6,3 ml/h
AA1503	AutoFuser® 150 ml 2 Tage, OP à 10 Stk. Flussrate 3,1 ml/h
AA1511	AutoFuser® 150 ml 4 Tage, OP à 10 Stk. Flussrate 1,6 ml/h
AA1509	AutoFuser® 150 ml 7 Tage, OP à 10 Stk. Flussrate 0,9 ml/h
AA2005	AutoFuser® 275 ml 2 Tage, OP à 10 Stk. Flussrate 5,7 ml/h
AA2002	AutoFuser® 275 ml 5 Tage, OP à 10 Stk. Flussrate 2,3 ml/h
AA2003	AutoFuser® 275 ml 7 Tage, OP à 10 Stk. Flussrate 1,6 ml/h

Weitere Modelle auf Anfrage

Modell	AutoSelector®
AFSC-B	AutoSelector® 100 ml Typ B, Flussrate 1 – 14 ml/h, OP à 10 Stk.
AFMC-B	AutoSelector® 275 ml Typ B, Flussrate 1 – 14 ml/h, OP à 10 Stk.
AFLC-B	AutoSelector® 550 ml Typ B, Flussrate 1 – 14 ml/h, OP à 10 Stk.

PCA Modelle mit Bolus und Sperrzeit auf Anfrage

ERMED AG

Tel 052/687 40 80
www.erved.ch
Zunderst Wyler 14

Fax 052/687 40 89
info@erved.ch
8226 Schleithem