

Abdo-safe

Das Sicherheits-Aszitespunktionsbesteck



Sichere Veresnadel

Durch die Verwendung einer Sicherheitspunktionsnadel reduziert sich das Risiko iatrogenen Komplikationen. Denn diese sogenannte Veresnadel verfügt über eine atraumatische Spitze, die sich beim Einführen zurückschiebt und eine scharfe Hohnadel freilegt, bei Erreichen des Abdominalraumes aber automatisch wieder nach vorne springt und die Nadelspitze abdeckt. So wird die Verletzungsgefahr minimiert.



Multiple Anwendungsmöglichkeiten durch Drei-Wege-Hahn

Nach dem Punktionsvorgang dient die Luer-Lock Spritze der Probenentnahme. Anschließend ermöglicht der Drei-Wege-Hahn eine Aszites-Drainage mit Hilfe der Schwerkraft. Ein Verschluss der Drainage ist nach Bedarf möglich.



Katheter kann kurzzeitig als „Mini-Drain“ fungieren

Ein neuartiger, röntgenkontrastgebender Katheter verhindert ein Festsaugen während der Aspiration. Bei rezidivierenden Ergüssen kann er auch kurzzeitig als „Mini-Drain“ belassen werden, ein nochmaliges Punktieren ist nicht notwendig. Dies führt zu einer reduzierten Belastung für den Patienten und senkt den Zeit- und Kostenaufwand.

Sicherheitsventile



1. an der Punktionsnadel

selbstschießend, für die Verwendung mittels Luer-Lock Spritze

2. direkt am Katheter

selbstschießend



Farbindikator zeigt das Eindringen in den Abdominalraum an

Der rote Farbindikator an der Sicherheitspunktionsnadel dient als visuelle Hilfe, indem er beim Durchdringen des Gewebes nach hinten gedrückt wird, sobald der Widerstand aber überwunden ist und die atraumatische Spitze hervortritt, wieder in seine Ausgangsposition zurückkehrt.



Bestandteile des Sets

- 2 Drainagebeutel (2.000 ml) mit Schlauch zum Anschluss an Drei-Wege-Hahn
- Röntgenkontrastgebender Katheter (Ch. 8) mit integrierter Sicherheitspunktionsnadel (Veresnadel 14 G, 170 mm)
- Luer-Lock Spritze (60 ml)

Verpackungseinheit	Artikelnummer
20	27050

Abdo-safe

Das Sicherheits-Aszitespunktionsbesteck



 HERSTELLER

Primed® HALBERSTADT
MEDIZINTECHNIK GMBH
STRASSE DES 20. JULI 1
D-38820 HALBERSTADT
TEL.: 0049-(0)3941-668-6
FAX: 0049-(0)3941-24565
PRIMED@PRIMED-HALBERSTADT.DE

Vertrieb

ERMED AG

Tel 052/687 40 80
www.erved.ch
Zunderst Wyler 14

Fax 052/687 40 89
info@erved.ch
8226 Schleithelm

Technische Änderungen vorbehalten!

MAT 90329

Revisionsstatus: 00/2024-08-06



WWW.PRIMED-HALBERSTADT.DE